

Japanse encefalitis virus antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Japanse encefalitis virus antistoffen
Aanvraag code:	56236
Frequentie:	1 x per week - Verzending dagelijks
Uitvoerend labo:	Instituut voor Tropische Geneeskunde
TAT:	8 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	IFA voor IgG & IgM
Interferentie:	

Infecties met andere flavivirussen, of voorgaande vaccinatie bv.
gele koorts vaccin

Interpretatie:

In de eerste week na het begin van de koorts kan het virus zelf opgespoord worden met PCR in lichaamsvochten, in die periode vaak gepaard gaand met een nog negatieve serologie (vensterperiode).

Vermeld steeds land van herkomst, datum start symptomen en datum staalafname op het aanvraagformulier.

Eenheid:

Titer

Tarificatie

Nomenclatuur:

551250 - 551261 B 500 Opsporen van antilichamen tegen tropische virussen (gele koorts, Dengue, West-Nile, Chikungunya, hemorrhagische koortsvirussen) #(Maximum 5)(Cumulregel [328](#))

Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

14-04-2026