

## C3d

### Beschrijving van de test

Naam:	C3d
Synoniemen:	Complement C3d
Aanvraag code:	24864
Frequentie:	Wekelijks (in batch) - verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	3 weken
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

### Afname van het materiaal

Afname:	EDTA op ijs
Toegelaten recipiënt:	EDTA tube op ijs
Volume:	1 mL EDTA plasma op ijs

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Staalafname op ijs, binnen het uur naar het labo brengen, daarna gekoeld centrifugeren (4°C) en plasma invriezen (-20°C) voor verzending.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

### Analyse

Analysemethode:	Nefelometrie - Dako; IMAGE 800 (Beckman Coulter)
Deelname EKE:	nee
Interferentie:	Correcte interpretatie vraagt simultane bepaling van C3

Eenheid: mg/dL

## Tarificatie

Nomenclatuur: 541170 - 541181 B 125 Doseren van C3 d met een immunologische methode #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

10-07-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.