

## Pyruvaat

### Beschrijving van de test

Naam:	Pyruvaat
Aanvraag code:	71074
Loinc:	14121-8
Frequentie:	1x / 2 weken
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	3 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

### Afname van het materiaal

Afname:	EDTA op ijs
Toegelaten recipiënt:	EDTA tube, overbrengen in speciale buis (labo contacteren!)
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	EDTA op ijs. Bij het EDTA staal wordt er 30µl 0.5M citroenzuur toegevoegd (voor +/- 3 ml EDTA volbloed, bij kleinere volumes volbloed moet er minder citroenzuur toegevoegd worden). Na mengen: onmiddellijk centrifugeren en het plasma invriezen voor verzending.
Bijaanvraag:	Geen bijaanvraag mogelijk.

### Analyse

Analysemethode:	Enzymatische fotometrie
Deelname EKE:	ERNDIM-EQAS
Eenheid:	mmol/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 540116 - 540120 B 400 Doseren van pyrodruivenzuur  
#(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

11-08-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.