

Surveillance VRE screening

Beschrijving van de test

Naam:	Surveillance VRE screening
Aanvraag code:	52340
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Loinc:	5953
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	2 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	FSA (Eswab). Breng de wisser intrarectaal, draai deze voorzichtig rond en verwijder. Plaats de wisser in transportmedium (roze dop). Breek het stokje af, sluit met de dop en label correct. Voor indicaties wie wanneer te screenen, zie intranet – edoc – Vancomycine Resistente Enterokokken (VRE) screening.
Volume:	NVT

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname naar het laboratorium gebracht. Indien niet mogelijk wordt het staal gekoeld bewaard.
-------------	--

Analyse

Analysemethode:	Kweek op een chromogene selectieve bodem, identificatie en uitvoeren van gevoeligheidsbepaling (antibiogram).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano, SKML, UK NEQAS

Interpretatie:

Enterococcen zijn darmbacteriën vandaar dat het rectum (en niet het perineum of de liesplooien) moet bemonsterd worden. VRE zijn meestal *E. faecium* of *E. faecalis*. Ze vertonen een verworven resistentie voor glycopeptiden (vancomycine) en zijn vaak multi-drug resistent waardoor zeer moeilijk te behandelen. Tweemaal per jaar worden alle dialysepatiënten gescreend op aanwezigheid van VRE. Daarnaast worden hemato-patiënten wekelijks gescreend op indicatie.

Laatst gewijzigd op

18-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.