

## Surveillance MSSA screening

### Beschrijving van de test

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Naam:                      | Surveillance MSSA screening           |
| Aanvraag code:             | 52330                                 |
| Aanvraagbrief:             | <a href="#">AFAZFAB00004</a>          |
| Loinc:                     | 100897-8                              |
| Frequentie:                | Dagelijks                             |
| TAT:                       | 3 dagen (indien negatief) tot 5 dagen |
| 24u/24u:                   | Nee                                   |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Katelijne Floré                   |

### Afname van het materiaal

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afname: | FSS wisser (blauwe dop, TSB Salt Broth) t.h.v. neus, keel, perineum. FSS wisser (blauwe dop) t.h.v. neus, keel, perineum. Bij de gepoolde S. aureus screening (met dezelfde kit als de MRSA screening) wordt achtereenvolgens de roze wisser vooraan in beide neusgaten rondgedraaid, wordt met de tweede roze wisser t.h.v. de tonsilbogen gestreken en wordt tenslotte met de derde witte wisser t.h.v. het perineum gestreken. De roze wissers worden kortstondig in het bijgevoegd transportmedium gebracht en nadien weggegooid. De witte wisser blijft in het medium ter plaatse, het stokje wordt afgekraakt en de blauwe dop wordt gebruikt om het buisje te sluiten. |
| Volume: | NVT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|             |                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptatie: | Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname naar het laboratorium gebracht. Indien niet mogelijk wordt het staal gekoeld bewaard. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Analyse

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysemethode: | Aanrijking in TSB Salt broth en kweek op een chromogene selectieve bodem, identificatie en uitvoeren van gevoeligheidsbepaling (antibiogram). Begeleidende flora zoals Gram-negatieve enterobacteriën worden door toevoeging van antibiotica onderdrukt. |
| IVDR status:    | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant                                                                                                                                                                                                       |
| Deelname EKE:   | Sciensano, SKML, NEQAS                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interpretatie:  | Tweemaal per jaar opsporen van dragerschap bij dialysepatiënten om het risico op een invasieve infectie met S. aureus te reduceren.                                                                                                                      |

## Laatst gewijzigd op

18-03-2026