

Bacteriële kweek Groep B Streptokok (GBS)

Beschrijving van de test

Naam:	Bacteriële kweek Groep B Streptokok (GBS)
Synoniemen:	Streptococcus agalactiae, groep B streptokok
Aanvraag code:	52350
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Loinc:	584-3
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	5 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Vaginale en rectale afname met éénzelfde wisser, lichtblauwe afnameset (LIM broth, Copan). Uitvoering bij alle zwangeren tussen week 35-37 van de zwangerschap. Bij patiënten die nog niet gescreend werden kan in geval van dreigende vroeggeboorte of tijdens de bevalling nog een afname gebeuren. Voor een gewone vaginale kweek dient een aparte wisser (klassieke Eswab, roze dop) afgenomen te worden.
Volume:	NVT

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	NVT

Analyse

Analysemethode:

Aanrijking in LIM broth gevolgd door kweek op selectief en chromogeen milieu. Gevoeligheidsbepaling (antibiogram) m.b.v. disk diffusie wordt steeds uitgevoerd bij groei van GBS om bij penicilline allergie de correcte profylaxe te kunnen kiezen.

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano, SKML, UK NEQAS
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Interpretatie:	Zwangere vrouwen die GBS draagster zijn moeten bij het begin van de partus chemoprophylaxe krijgen ter voorkoming van invasieve groep B streptokokken ziekte bij de pasgeborene.

Laatst gewijzigd op

18-03-2026