

Bacteriële kweek synoviaal vocht

Beschrijving van de test

Naam:	Bacteriële kweek synoviaal vocht
Synoniemen:	Gewrichtsvocht
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	7 dagen
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Synoviaal vocht knie, schouder, heup, andere
Toegelaten recipiënt:	Aseptische afname in steriel, goed afgesloten recipiënt, hemocultuurfles

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Klinische inlichtingen en lokalisatie gewricht op aanvraagbrief vermelden.
-------------	--

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Interpretatie:	Gelieve enkel gewrichtsvocht in een hemocultuurfles in te spuiten als er daarnaast ook voldoende vocht aangeleverd kan worden in een gewoon steriel potje. Kweek in een hemocultuurfles zou gevoeliger zijn dan de routine kweek maar heeft als nadeel dat er geen gramkleuring kan uitgevoerd worden, dat er enkel een kwalitatief resultaat bekomen wordt en

dat de minste contaminatie van het staal tijdens de procedure
aanleiding geeft tot vals positieve resultaten.

Laatst gewijzigd op

19-08-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.