

Helicobacter kweek

Beschrijving van de test

| | |
|----------------------------|---|
| Naam: | Helicobacter kweek |
| Aanvraag code: | 51566 |
| Aanvraagbrief: | AFAZFAB00004 |
| Loinc: | 87953-6 |
| Uitvoerend labo: | Hospital Mont-Godinne |
| TAT: | Helicobacter pylori is een trage groeier. Het kan tot 7 dagen duren om de kiem op te kweken en bijkomend tot 21 dagen om antimicrobiële gevoeligheidstests uit te voeren. |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Katelijne Floré |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Afname: | Weefselbiopt |
| Toegelaten recipiënt: | Steriel potje met schroefdop |
| Transportconditie: | Kamertemperatuur |
| Bewaarconditie: | Koelkast |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|-------------|--|
| Acceptatie: | Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Daarna wordt het diepgevroren bij -20°C voor verzending. |
|-------------|--|

Analyse

| | |
|-----------------|---|
| Analysemethode: | Microscopie, kweek met aanrijking, identificatie en gevoeligheidsbepaling. |
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Interpretatie: | Vals negatieve kweekresultaten kunnen optreden indien de kweek niet binnen de 48u na afname biopt wordt ingezet of wanneer de patiënt onder therapie staat. |

Kweek H. pylori wordt enkel uitgevoerd om therapie aan te passen op geleide van antibiogram bij therapieresistente infectie. In eerste instantie wordt de gevoeligheid voor clarithromycine getest. Indien resistent wordt bijkomend de gevoeligheid voor amoxicilline, tetracycline, levofloxacin en metronidazole bepaald. In vitro gevoeligheid garandeert niet immer klinisch succes.

Tarificatie

Nomenclatuur: 550373 - 550384 B 400 Aërobe kweek van etter (exclusief vaginaal secreet), exsudaten, punktievloeistoffen en biopten #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

18-03-2026