

## Vigabatrine

### Beschrijving van de test

Naam:	Vigabatrine
Synoniemen:	Sabril
Aanvraag code:	29132
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00009</a>
Loinc:	30042-6
Frequentie:	2 keer per week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 week
TAT Dringend:	1 dag (weekdagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Heparine plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube, heparine tube
Volume:	200 µL
Speciale afname condities:	Dalspiegel
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

### Analyse

Analysemethode:	LC-MS/MS
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	LGC - Therapeutic Drugs (TDM)
Interferentie:	Interferentie mogelijk door simultane inname van metformine. De kwantificatie van vigabatrine kan hierdoor vals verhoogd zijn (afwijking kan >15% bedragen).
Interpretatie:	Dalspiegel (= bloedafname net vòòr inname medicatie) tijdens steady-state vereist voor adequate interpretatie. Steady-state wordt bereikt na toediening constante dosis gedurende ten minste 4-6 halflevens (t <sub>1/2</sub> vigabatrine: 5-8u).
Eenheid:	µg/mL

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	2.0-10.0 µg/mL	2.0-10.0 µg/mL

## Tarificatie

Nomenclatuur:	548295 - 548306 B 1600 Doseran van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) #(Maximum 2)(Diagnose 46) Bron: RIZIV website op 26/04/2026
---------------	--

## Laatst gewijzigd op

14-04-2026