

Zikavirus IgM antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Zikavirus IgM antistoffen
Synoniemen:	Zika, microcefalie, Guillain-Barré
Aanvraag code:	56232 en 56234
Frequentie:	1 à 2x/week
Uitvoerend labo:	Instituut voor Tropische Geneeskunde
TAT:	7 dagen
TAT Dringend:	3 à 7 dagen (in overleg met ITG)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	1000 µL voor 1 à 2 analyses

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	ELISA / Immunofluorescentietest voor het opsporen van IgG en IgM-antistoffen.
-----------------	---

Interferentie:	Serologische kruisreacties te verwachten met andere flavivirussen
Interpretatie:	Serologie dient aangewend te worden voor patiënten die langer dan 1 week teruggekeerd zijn uit endemisch gebied. Duidelijke kruisreactiviteit te verwachten in dengue-ELISA. PCR op serum kan gebeuren van dag 0 tot dag 5 na start van koorts of symptomen; PCR op urine kan gebeuren vanaf dag 3 tem dag 30 na start van koorts of symptomen.

Tarificatie

Nomenclatuur:	551250 - 551261 B 500 Opsporen van antilichamen tegen tropische virussen (gele koorts, Dengue, West-Nile, Chikungunya, hemorrhagische koortsvirussen) #(Maximum 5)(Cumulregel 328) Bron: RIZIV website op 01/04/2025
---------------	--

Laatst gewijzigd op

04-03-2025
station

Glims system