

## Brucella spp IgG

### Beschrijving van de test

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Naam:                      | Brucella spp IgG     |
| Aanvraag code:             | 56322                |
| Loinc:                     | 56630-7              |
| Frequentie:                | 3x/week              |
| Uitvoerend labo:           | AZ Sint Jan          |
| TAT:                       | 24 uur - 4 dagen     |
| TAT Dringend:              | 24 uur               |
| 24u/24u:                   | nee                  |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Marijke Reynders |

### Afname van het materiaal

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Afname:               | Serum          |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube |
| Volume:               | 2,6 mL         |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptatie:  | Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.<br>AFAZFAB00007 Aanvraagbrief Infectieuze serologie en moleculaire microbiologie.                                  |
| Bijaanvraag: | Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen. |

### Analyse

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysemethode: | ELISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deelname EKE:   | WIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interferentie:  | Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interpretatie:  | Een titerstijging of daling heeft meer betekenis dan een enkelvoudige titer. Kruisreacties tussen <i>Brucella abortus</i> en <i>Brucella melitensis</i> komen frequent voor. Vals positieve resultaten zijn mogelijk (o.a. na vaccinatie tegen <i>Vibrio cholerae</i> en bij infectie met <i>Francisella tularensis</i> ). |
| Eenheid:        | Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Tarificatie

Nomenclatuur: 551014 - 551025 B 80 Opsporen van antilichamen tegen *Brucellae* # (Maximum 1) (Cumulregel [326](#))  
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

## Laatst gewijzigd op

11-12-2024  
station

Glims system