

## Chlamydomphila psittaci IgA antistoffen

### Beschrijving van de test

Naam:	Chlamydomphila psittaci IgA antistoffen
Synoniemen:	Chlamydia psittaci, psittacose
Aanvraag code:	56274
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00007</a>
Loinc:	6915-3
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	7 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

### Analyse

Analysemethode:	Microimmunofluorescentie (Euroimmun)
-----------------	--------------------------------------

Deelname EKE:	SKML
Interferentie:	Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Interpretatie:	<p>Een positieve IgA bepaling is een sterke indicatie voor een acute <i>C.psittaci</i> infectie of een recent doorgemaakte reïnfectie/reactivatie. De test spoort niet alle <i>C. psittaci</i> serotypes op, maar wel de meest voorkomende. Kruisreactie met andere <i>Chlamydia</i> species is mogelijk (zeker <i>C.pneumoniae</i>) , maar kan ook te wijten zijn aan coinfectie met meer dan een <i>Chlamydia</i> species.</p> <p>Serokinetiek van <i>Chlamydia psittaci</i> antistoffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Primaire infectie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ IgM na 2 - 3 weken (t<sub>1/2</sub>=5-7 d)</li> <li>○ IgA na 3 weken (t<sub>1/2</sub>=6-8 d)</li> <li>○ IgG na 5 - 8 weken (t<sub>1/2</sub>=20-25 d)</li> </ul> </li> <li>• <b>Reïnfectie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ IgM mogelijk afwezig of lage concentratie</li> <li>○ IgA na 1 week-10 dagen</li> <li>○ IgG vroeger &amp; boostereffect: 1-2 weken na infectie (3 dagen- 1 week na IgA).</li> </ul> </li> </ul>
Eenheid:	Titer

## Tarificatie

Nomenclatuur: 551972 - 551983 B 200 Opzoeken van Chlamydia antilichamen #(Maximum 3)(Cumulregel [327](#))(Diagnoseregel [74](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

21-08-2024