

Chlamydomphila psittaci IgG antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Chlamydomphila psittaci IgG antistoffen
Synoniemen:	Chlamydia psittaci, psittacose
Aanvraag code:	56276
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00007
Loinc:	6916-1
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	7 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Microimmunofluorescentie (Euroimmun)
-----------------	--------------------------------------

Deelname EKE:	SKML
Interferentie:	Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Interpretatie:	Seroconversie of significante titerstijging bij gepaarde monsters kan een acute of recente infectie bevestigen. De test spoort niet alle infecties met <i>C. psittaci</i> serotypes op, maar wel de meest voorkomende. Kruisreactie met andere <i>Chlamydia</i> species is mogelijk, maar kan ook te wijten zijn aan coinfectie met meer dan een <i>Chlamydia</i> species.
Eenheid:	Titer

Tarificatie

Nomenclatuur: 551972 - 551983 B 200 Opzoeken van Chlamydia antilichamen #(Maximum 3)(Cumulregel [327](#))(Diagnoseregel [74](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

07-08-2024