

C1 esterase inhibitor (functioneel)

Beschrijving van de test

Naam:	C1 esterase inhibitor (functioneel)
Synoniemen:	C1 INH
Aanvraag code:	24872
Frequentie:	1 x per week - verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	2 weken
24u/24u:	Nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA op ijs
Toegelaten recipiënt:	EDTA tube
Volume:	1 mL EDTA plasma
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Staalafname op ijs, binnen het uur naar het labo brengen, daarna gekoeld centrifugeren (4°C) en plasma invriezen (-20°C) voor verzending.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Optische densiteit - kinetisch; BCS-XP (Siemens Medical Solutions Diagnostics - Dade Behring).
Deelname EKE:	nee
Eenheid:	%

Tarificatie

Nomenclatuur:	556172 - 556183 B 250 Funktionele bepaling van de C1 esterase inhibitor #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/04/2025
---------------	---

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system