

## Cryptococcus antigeen in serum

### Beschrijving van de test

Naam:	Cryptococcus antigeen in serum
Synoniemen:	cryptococcosis
Aanvraag code:	56050
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00007</a>
Loinc:	9820-2
Frequentie:	Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	7 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

### Analyse

Analysemethode:	Lateral flow immunoassay (Alere Abbott)
Deelname EKE:	UKNeqas

Interferentie:  
Interpretatie:

Lipemisch monster

Cryptococcose is een invasieve schimmelinfectie veroorzaakt door *Cryptococcus neoformans* of *Cryptococcus gattii*. *C. neoformans* is geïsoleerd uit verschillende natuurlijke bronnen, met name verweerde duivenuitwerpselen. *C. gattii* werd voorheen uitsluitend geassocieerd met tropische en subtropische gebieden. Recentelijk is echter vastgesteld dat deze micro-organismen endemisch is het noordwesten van de Verenigde Staten, en geassocieerd wordt met meerdere boomsoorten.

De infectie wordt meestal respiratoir opgelopen. Patienten zijn zich vaak niet bewust van een mogelijke blootstellingsgeschiedenis. Ongeveer de helft van de patienten met symptomatische ziekte heeft een onderliggende immuunsuppressieve aandoening, zoals AIDS, corticosteroidtherapie, lymfoom of sarcoidose. Symptomen kunnen koorts, hoofdpijn, duizeligheid, ataxie, sufheid en hoesten omvatten. De meerderheid van de *C. neoformans*-infecties komt voor bij immuungecompromitteerde patienten, *C. gattii* heeft een hogere prevalentie bij gezonde individuen.

Naast de longen zijn bij cryptococcose vaak het centraal zenuwstelsel betrokken, met name bij patienten geïnfecteerd met HIV. De mortaliteit onder patienten met cryptococcose van het CZS kan ondanks antimicrobiele therapie oplopen tot ongeveer 25%. Onbehandelde cryptococcose van het CZS is vrijwel altijd fataal. Gedissemineerde ziekte kan elk orgaansysteem aantasten en komt meestal voor bij immuungecompromitteerde personen.

De aanwezigheid van cryptococcus antigen in serum of cerebrospinaal vocht is een bewijs van doorgemaakte of actieve infectie. Een negatief resultaat op een enkelvoudig monster sluit de mogelijkheid niet uit.

Gedissemineerde infectie gaat meestal gepaard met een positieve test in serum. Dalende titers onder therapie kunnen een indicatie zijn van regressie van infectie, maar zwak-positieve titers kunnen nog langdurig gedetecteerd worden na adequate therapie en resolutie van infectie en zijn dus niet zinvol op te volgen.

Eenheid:

Titer

## Referentiewaarden

**Leeftijd**

**Mannen**

**Vrouwen**

Niet reactief Titer

Niet reactief Titer

## Tarificatie

Nomenclatuur: 551832 - 551843 B 400 Diagnose van systemische cryptococcose door opsporen van cryptococceen-antigeen #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

21-08-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.