

Chylomicronen

Beschrijving van de test

Naam:	Chylomicronen
Aanvraag code:	22090
Frequentie:	2x/week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	4 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Pleuravocht, ascitesvocht, pericardvocht
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube
Volume:	1 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• Periode bloedafname - staalontvangst 90min • Patiëntenlabel aanwezig • In recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	2 dagen

Analyse

Analysemethode:	Electroforese (Sebia Hydrasys)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Interferentie:	• Lipemische stalen: Hoge chylomicronen bij niet-nuchtere staalafname

- Fibrinogeen (farmaca): Stalen afgenomen op heparine/patiënten onder heparine-behandeling: mobiliteitsverschuiving van de fracties

Interpretatie:	Het lipidogram is ontwikkeld voor de determinatie en fenotypering van het lipoproteïnenprofiel. Op basis van de lading en afmeting worden via zone-elektroforese volgende fracties van elkaar gescheiden: chylomicronen, bèta-lipoproteïnen of LDL (Low Density Lipoproteïnen), pre-bèta-lipoproteïnen of VLDL (Very Low Density Lipoproteïnen), Lipoproteïne (a) Lp(a) en alfa-lipoproteïnen of HDL (High Density Lipoproteïnen). o.b.v. deze fracties kunnen hyperlipoproteïnemieën geclassificeerd worden in relatie met de concentratie totaal cholesterol, triglyceriden en apolipoproteïne B en A1. Bij aanwezigheid van Lp(a) wordt Lp(a) nefelometrisch bevestigd.
Eenheid:	%

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0-2 %	0-2 %

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro:	41.00
----------------	-------

Laatst gewijzigd op

18-03-2025 station	Glims system
-----------------------	--------------