

## CMV IgG Aviditeit

### Beschrijving van de test

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Naam:                      | CMV IgG Aviditeit                                      |
| Aanvraag code:             | 56166                                                  |
| Loinc:                     | 52984-2                                                |
| Frequentie:                | Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen. |
| Uitvoerend labo:           | AZ Sint Jan                                            |
| TAT:                       | 8 uur - 3 dagen                                        |
| TAT Dringend:              | 8 uur                                                  |
| 24u/24u:                   | nee                                                    |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Marijke Reynders                                   |

### Afname van het materiaal

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Afname:               | Serum                            |
| Toegelaten materiaal: | Plasma                           |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube, Li-heparine tube |
| Volume:               | 2,6 mL                           |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptatie:  | Gestold bloed, plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.<br>AFAZFAB00007 Aanvraagbrief Infectieuze serologie en moleculaire microbiologie                           |
| Bijaanvraag: | Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen. |

### Analyse

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysemethode: | Chemiluminescentie Micropartikel Immunoassay (CMIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deelname EKE:   | Sciensano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interferentie:  | Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interpretatie:  | <p>(a) Hoge aviditeit: 60%. In associatie met CMV IgG+, IgM-: vroegere infectie, laag risico op in utero transmissie van virus. In associatie met CMV IgG+, IgM+: niet-primaire CMV-infectie (re-infectie of reactivatie); laag risico op in utero transmissie van het virus.</p> <p>(b) Intermediaire aviditeit: ? 50% en 60%. Geen besluitvorming mogelijk, serologie op te volgen.</p> <p>(c) Lage aviditeit: 50%. Geen besluitvorming mogelijk, serologie op te volgen.</p> <p>Enkel een hoge aviditeit is conclusief naar datering van de primaire CMV-infectie toe.</p> |
| Eenheid:        | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 17.00

### Laatst gewijzigd op

18-04-2025  
global

Glims system