

Hemopexine

Beschrijving van de test

Naam:	Hemopexine
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer: dagelijks op weekdays
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube, Li-Heparine tube
Volume:	200 µL
Transportconditie:	Ingevroren

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

Analyse

Analysemethode:	Nefelometrie
Deelname EKE:	nee
Interpretatie:	

Hemopexine is een haem-bindend plasmaproteïne. Verlaagde concentratie bij chronische en massieve hemolyse in vivo, na saturatie van de Hb-bindingscapaciteit van haptoglobine. In tegenstelling tot haptoglobine is hemopexine geen acute fase eiwit en vertoont dus geen biologische interferentie door inflammatie.

Eenheid: g/L

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system