

## Mononucleosis slide test

### Beschrijving van de test

Naam:	Mononucleosis slide test
Aanvraag code:	56180
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00007</a>
Loinc:	94149-2
Frequentie:	Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	4 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

### Analyse

Analysemethode:	Immuno-assay test (solid phase immunochromatographic assay): Clearview IM
Deelname EKE:	SKML

Interferentie: Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.

Interpretatie: 50% van de kinderen jonger dan 4 jaar maken geen IM heterofiele antistoffen aan en tot de leeftijd van 8 - 10 jaar is de gevoeligheid van Paul & Bunnell test suboptimaal. Heterofiele antistoffen komen ook voor bij andere ziektes, zoals leukemie, reumatoïde artritis, virale hepatitis, CMV infectie, Burkitt lymphoma.... En zijn dus niet erg specifiek.

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Negatief	Negatief

## Tarificatie

Nomenclatuur: 551515 - 551526 B 100 Serologische test met het oog op de diagnose van mononucleose #(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

07-08-2024