

4de generatie combo-sneltest voor HIV

Beschrijving van de test

Naam:	4de generatie combo-sneltest voor HIV
Synoniemen:	HIV sneltest, 4de generatie combotest HIV
Aanvraag code:	56100
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00007
Loinc:	75666-8
Frequentie:	Op aanvraag, 24/24u 7/7d
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 uur
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, EDTA tube
Volume:	0,5mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten. Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Immunochemografie
-----------------	-------------------

Deelname EKE:
Interpretatie:

Sciensano / NRL

De test detecteert niet alle geïnfecteerde personen gezien er rekening dient gehouden te worden met de serologische vensterperiode net na het oplopen van HIV-infectie en tevens met de immuunstatus.

Daar vals-positieve resultaten zeer uitzonderlijk mogelijk zijn, wordt sowieso elk serummonster van een niet-gekende nieuwe patient de eerstvolgende werkdag geanalyseerd d.m.v. routinescreening op HIV via MPIA (EIA voor gecombineerde detectie van Ag p24 - HIV1/2-antistoffen). Elk positief resultaat wordt doorgebeld door microbioloog aan aanvragende arts.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Negatief	Negatief

Tarificatie

Nomenclatuur: 551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

552016 - 552020 B 250 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek #(Maximum 3)(Cumulregel [323](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

21-05-2025