

## Directe bilirubine

### Beschrijving van de test

Naam:	Directe bilirubine
Synoniemen:	Bilirubine, direct, geconjugeerd
Aanvraag code:	21201
Loinc:	15152-2
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

### Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Li-heparine, Serum gel tube
Volume:	2,6 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Periode bloedafname - staalontvangst 90min</li><li>• Patiëntenlabel aanwezig</li><li>• In recipiënt zoals aangegeven in de labogids</li></ul>
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten 48 uren max.

### Analyse

Analysemethode:	Colorimetrie
-----------------	--------------

IVDR status: CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant  
Deelname EKE: Sciensano Chemie; BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry  
Interferentie:

1. Hemolyse >1000 mg/dL;  
Lipemie L-index >750.
2. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström's macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.

Interpretatie: Metingen van bilirubine worden gebruikt voor de diagnose van leveraandoeningen, bij de opsporing van hemolytische anemie en bij evaluatie van de verschillende stadia van geelzucht.

Eenheid: mg/dL

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 1 jaar		
1 jaar-10 jaar	0.10 mg/dL	0.10 mg/dL
10 jaar-19 jaar	0.80 mg/dL	0.60 mg/dL
> 19 jaar	0.30 mg/dL	0.30 mg/dL

## Tarificatie

Nomenclatuur: 540175 - 540186 B 80 Doseran van totale bilirubine en van de fracties ervan #(Maximum 1) (Cumulregel [5](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

22-05-2025