

Bacteriële kweek *Helicobacter*

Beschrijving van de test

Naam:	Bacteriële kweek <i>Helicobacter</i>
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	15 dagen. <i>Helicobacter pylori</i> is een trage groeier. Het kan tot 7 dagen duren om de kiem op te kweken en bijkomend tot 21 dagen om antimicrobiële gevoeligheidstests uit te voeren.
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Gastro-duodenaal biopt, ondergedompeld in steriel fysiologisch water
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek met aanrijking, identificatie en gevoeligheidsbepaling. Uitvoerend labo: CHU UCL Namur.
Interpretatie:	Vals negatieve kweekresultaten kunnen optreden indien de kweek niet binnen de 48u na afname biopt wordt ingezet of wanneer de patiënt onder therapie staat. Kweek <i>H. pylori</i> wordt enkel uitgevoerd om therapie aan te passen op geleide van antibiogram bij therapieresistente infectie. In eerste instantie wordt de gevoeligheid voor clarithromycine getest. Indien resistent wordt bijkomend de

gevoeligheid voor amoxicilline, tetracycline, levofloxacin en metronidazole bepaald. In vitro gevoeligheid garandeert niet immer klinisch succes.

Laatst gewijzigd op

07-02-2025
global

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.