

Cortisol in speeksel

Beschrijving van de test

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Naam: | Cortisol in speeksel |
| Aanvraag code: | 23207 |
| Loinc: | 2142-8 |
| Frequentie: | Dagelijks op wekdagen |
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Jan |
| TAT: | 3 dagen |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Michel Langlois |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Afname: | Speeksel |
| Toegelaten recipiënt: | Salivette (Sarstedt) |
| Volume: | 1 mL |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|--------------|--|
| Acceptatie: | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia |
| Bijaanvraag: | Geen |

Analyse

| | |
|-----------------|--|
| Analysemethode: | Roche CobasPure electrochemiluminescentie immunoassay (ECLIA). |
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Deelname EKE: | nee |
| Interferentie: | Lage pH (vitamine C, fruitsappen); bloed |
| Interpretatie: | De salivaire cortisolbepaling wordt gebruikt voor het inschatten van de vrije cortisolfractie. |

Eenheid: $\mu\text{g/dL}$

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Middernacht (+/- 30min): 0.274

Middernacht (+/- 30min): 0.274

Voormiddag (6u tot 10u): 0.736

Voormiddag (6u tot 10u): 0.736

Namiddag (16u tot 20u): 0.252 $\mu\text{g/dL}$

Namiddag (16u tot 20u): 0.252 $\mu\text{g/dL}$

Tarificatie

Nomenclatuur:

545090 - 545101 B 700 Dosereren van cortisol in speeksel
#(Maximum 1) (Cumulregel [228](#), [300](#), [322](#)) (Diagnoseregel [147](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

24-06-2025