

Xanthochromie (LV)

Beschrijving van de test

Naam:	Xanthochromie (LV)
Synoniemen:	Xanthochromie
Aanvraag code:	21550
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00028
Loinc:	13532-7
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Vers CSV (lumbaal vocht, suboccipitaal punctaat)
Toegelaten materiaal:	Tot 1 u na afname
Toegelaten recipiënt:	Steriele tube
Volume:	Min. 1 mL
Transportconditie:	Gekoeld
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• afgeschermd van het licht • vermelding tijd tussen start symptomen en staalname
Bijaanvraag:	Geen bijaanvraag mogelijk.

Analyse

Analysemethode:	Spectrofotometrische scanning tussen 360 nm en 800 nm.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Interferentie:	1. Verhoogd CSV concentratie aan proteïnen (>150 mg/dl) 2. Zeer traumatische LP (> 100.000 RBC/μl) 3. Methaemoglobine (door reductie vanuit oxyhaemoglobine) 4. Systemische hyperbilirubinemie (hemolytische/hepatische ziekten) met een totaal bilirubine serum >10-15 mg/dL 5. Medicatie (o.a.cephalosporines) 6. Caroteen (Vit-A-derivaten)
Interpretatie:	Interpretatie volgens het algoritme van de richtlijnen van Cruickshank (Cruickshank A, Auld P, Beetham R, et al. Revised national guidelines for analysis of cerebrospinal fluid for bilirubin in suspected subarachnoid haemorrhage. Ann Clin Biochem 2008; 45: 238-244).

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 16.00

Laatst gewijzigd op

28-07-2026