

INR alternatief

Beschrijving van de test

Naam:	INR alternatief
Aanvraag code:	INR
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uur
TAT Dringend:	45 min
24u/24u:	ja
Accreditatie:	ISO 15189:2012 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Citraat
Toegelaten recipiënt:	Citraat
Volume:	1 mL bloed

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten • periode bloedafname - staalontvangst 7 uur • patiëntenlabel aanwezig • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	• 7 uur indien bewaard op KT° of frigo • tot 1 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren

Analyse

Analysemethode:	Automatische (optische) meting op ACL Top (Werfen) of manuele (mechanische) meting op STart Max (Stago).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano
Interferentie:	Lipemische, icterische en hemolytische stalen kunnen onbetrouwbare resultaten geven bij de standaard automatische optische aflezing van de stollingstijd. In dit geval wordt een alternatieve manuele methode gebruikt waarbij de stoltijd mechanisch wordt bepaald, met echter een grotere variabiliteit op het resultaat.
Interpretatie:	Zie labogids voor PT.
Eenheid:	INR

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Ref: 0.8-1.2VKA: 2.0-3.0VKA, mech. klep: 2.5-3.5 INR	Ref: 0.8-1.2VKA: 2.0-3.0VKA, mech. klep: 2.5-3.5 INR

Laatst gewijzigd op

07-08-2024
station

Glims system