

COVID-19 sneltest geriatrie

Beschrijving van de test

Naam:	COVID-19 sneltest geriatrie
Synoniemen:	COVID-sneltest (geriatrie)
Aanvraag code:	COV19_ALERE
Frequentie:	Tijdens weekdays van 8 - 17 uur: op infectieuze serologie; andere dagen en nacht: in het core lab.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 uur
TAT Dringend:	30 min
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Respiratoir staal
Toegelaten recipiënt:	UTM met wissers
Volume:	250 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Bijaanvraag:	Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities & archiefpositie), is dit toegelaten.

Analyse

Analysemethode:	Isotherme amplificatie
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano
Interferentie:	Erg bloederige of visceuze stalen kunnen interferentie geven, met vals-positiviteit als gevolg. Optimale uitvoering van de test

is afhankelijk van een goede monstercollectie met voldoende humane cellen.

Interpretatie:

Indien deze test negatief blijkt, maar klinisch een hoog-vermoeden op COVID-19, kan er steeds een meer gevoelige realtime PCR gebeuren voor COVID. Deze isotherme amplificatie is iets minder gevoelig dan onze routine PCR-analyse op de respikaart (signalen tot ct35 komen er nog uit met deze sneltest, zwakkere ladingen zullen gemist worden).

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Negatief

Negatief

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro:

20.00

Laatst gewijzigd op

20-01-2025
global

Glims system