

## FSH

### Beschrijving van de test

Naam:	FSH
Synoniemen:	Follikelstimulerend hormoon
Aanvraag code:	23120
Loinc:	15067-2
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 uur
TAT Dringend:	2 uur
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li-heparine tube
Volume:	4,7 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten Indien het serum bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 2d na afname.

### Analyse

Analysemethode:	Siemens Atellica CLIA (chemiluminescence immunoassay).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	EKE Sciansano / BIO-RAD EQAS

Interpretatie: Referentiewaarde FSH varieert in de menstruatiecyclus. FSH wordt best geïnterpreteerd samen met LH en oestradiol. FSH (en LH) verhoging bij primair hypogonadisme (ovariële/gonadale insufficiëntie), menopauze (geblokkeerde feedback door tekort aan oestrogenen), midcyclische stijging. FSH daling door hypothalamo-hypofysaire pathologie (secundair hypogonadisme): trauma, tumor, anorexia, psychogene amenorrhoea. Stimulatietest met GnRH kan secundair hypogonadisme door gestoorde GnRH secretie bevestigen.

Eenheid: U/L

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 3 jaar	1.3 U/L	1.3-5.0 U/L
3 jaar-9 jaar	0.4-2.0 U/L	0.5-5.0 U/L
9 jaar-11 jaar	0.4-4.6 U/L	1.4-9.3 U/L
11 jaar-21 jaar	1.4-7.5 U/L	2.2-10.1 U/L
21 jaar-70 jaar	1.4-18.1 U/L	
> 70 jaar		

## Tarificatie

Nomenclatuur: 546136 - 546140 B 300 Doseran van follikelstimulerend hormoon (FSH) #(Maximum 1) (Cumulregel [309](#), [322](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

28-08-2025