

## Bence-Jones proteïnurie

### Beschrijving van de test

Naam:	Bence-Jones proteïnurie
Aanvraag code:	24025
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 week
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Urineportie
Toegelaten materiaal:	Urine collectie
Toegelaten recipiënt:	Urinepotje
Volume:	250 µL (+ 100 µL serum indien beschikbaar)

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

### Analyse

Analysemethode:	Agarosegel electroforese met immunofixatie en specifieke detectie van albumine, tubulaire proteinurie, alfa-2 macroglobuline, IgG-A-M en kappa-lambda (vrij + gebonden).
Deelname EKE:	UKNEQAS

Interferentie:	Postrenale hematurie; pancreatico-cystostomie (urinaire proteolyse).
Interpretatie:	Glomerulaire proteinurie (selectief, matig selectief, niet-selectief); tubulaire proteinurie (tubulopathie of overflow); Bence-Jones proteinurie (vrije ketens); postrenale hematurie (alfa-2 macroglobulinurie).

## Tarificatie

Nomenclatuur:	543815 - 543826 B 700 Immunofixatie met een minimum gebruik van twee antihumane immunosera #(Maximum 1)(Cumulregel <a href="#">51</a> ) Bron: RIZIV website op 26/04/2026
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Laatst gewijzigd op

06-08-2024